

POSITIONERING

Produktlista för positioneringskuddar
v.2021.4MDR



Tlf kundservice: 019-25 40 40 Tlf produktfrågor och rådgivning: 0722 19 59 69, E-post: post@togemo.se

Grundläggande principer

Målsättningen för en förändring i brukarens "positioneringsvardag" skall vara att:

- Optimera funktion
- Reducera och/eller förebygga risk för sekundärskador
- Förbättra arbetsituationen för omsorgspersonal

Principerna för positionering:

- Rörelse är grundläggande
- Rörelse, så väl aktivt som passivt ska vara i balans och i symmetri
- Postural stabilitet utgör basen för funktionell aktivitet
- Kroppshållning påverkar de flesta kroppsliga funktioner
- Kroppshållning påverkar neurologiska symptom såsom reflexer och tonus
- Tyngdkraftens påverkan kan orsaka vävnadskada/deformiteter, men kan förebyggas vid adekvat positionering
- Ingen led skall vara i ytterläge under en längre tid
- Fysiskt och mentalt tillstånd påverkar varandra
- Stimulans genom aktivitet, både mentalt och fysisk, är viktig
- 24-tim schema underlättar och ger bäst möjlighet att genomföra positionering utifrån dessa principer
- Fotografera för att illustrera utvalda positioner.
- Märk upp positioneringsprodukterna

Nedsatt postural funktion och nedsatt förmåga till egna rörelser kan leda till:

- Muskelförkortning/förlängning som leder till kontrakturer och deformiteter
- Vävnadsskador inklusive trycksår
- Nedsatt syrenivå på grund av negativ påverkan av respirationen
- Infektioner i luft och urinvägar
- Osteoporos (Benskörhet)
- Matsmältningsbesvär/ förstoppning.
- Smärta och sekundärt nedsatt rörelseförmåga

Pauline M Pope skriver i kapitel 6, sid 105 i sin bok *Serve and complex Neurological Disability*; "De flesta sjuka brukare tillbringar många timmar till sängs och kan utsättas för olika skador. Det är högst troligt att de flesta assymmetrier uppstår i liggande position och sedan permanentas i sittande".

Dessa så kallade "vaneställningar" påverkar vardagen för brukaren. För att försöka motverka att felställningar och kontrakturer uppstår kan varierande och förebyggande lägesändringar och positioner under dygnets 24 timmar schemaläggas.

Funktion och självständighet skall vägas mot en "korrekt positionering". När brukaren hamnar i en "vaneställning" under långa perioder under dagen, kan vi kompensera med hjälp av lägesändring och positionering.

Förslag på positioner under 24-timmars positionering.

- Magläge (över kil eller rulle)
- Stå/upprätt position (tipp eller ståstöd)
- Sidoläge (30 ° och 120 ° på gymnastikmatta eller i säng)
- Sittande med frontalstöd (underarmsstöd)

Brukaren, omvårdnadspersonalen och anhöriga bör få återkommande support och uppdatering av handhavandet kring brukaren av leg. sjukgymnast/arbetsterapeut/sjuksköterska. En gemensam strategi skall antas utifrån nedanstående parametrar. Viktigt att handhavandet (management regime) följs av alla som i vardagen har kontakt med brukaren.

- Definition av problemställning
- Konsekvensutredning
- Motivering
- Planering
- Genomförande
- Utvärdering



Innehåll

Produkt	Sida
Universalkuddar	4
Böjda kuddar	6
S-kuddar	8
Nackkuddar	9
Trekantskuddar	10
Positioneringsrullar	11
Kilkuddar	12
Specialkuddar	13
Tryckavlastningskuddar	16
Utprovsnings-Kit	18
Förvaringsväskor	20
Combiöverdrag	21
Rengöring / Fakta	22
Noteringar	23



Universalkuddar



Universalkudden kan användas i sittande, halvsittande eller i liggande ställning. Kudden avlastar, skyddar och stabiliserar brukaren i en optimal position. Kuddarna finns i flera olika storlekar och kan utifrån behov användas från topp till tå.

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Universalkudde Blå	100x40	NEG1636
Överdrag, bomull		NEG1638
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG1637
Överdrag, Combi		NEG1636 HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Universalkudde Blå	70x40	NEG0944
Överdrag, bomull		NEG0970
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0957
Överdrag, Combi		NEG0944 HLEN

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Universalkudde Blå	60x40	NEG0605
Överdrag, bomull		NEG0628
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0621
Överdrag, Combi		NEG0605 HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Universalkudde Blå	60x30	NEG0943
Överdrag, bomull		NEG0969
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0956
Överdrag, Combi		NEG0943 HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Universalkudde Grön	45x30	NEG0881
Överdrag, bomull		NEG0904
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0894
Överdrag, Combi		NEG0881HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Universalkudde Blå (2-pack)	40x30	NEG0606
Överdrag, bomull (2-pack)		NEG3903
Inkontinens överdr. Polyurethan (2-pack)		NEG0692
Överdrag, Combi (2-pack)		NEG0606HLEN

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Universalkudde Tunn Grön (2-pack)	40x30	NEG3003
Överdrag, bomull (2-pack)		NEG3903
Inkontinens överdrag, polyurethan (2-pack)		NEG3803
Överdrag, Combi (2-pack)		NEG3003HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Universalkudde Blå	40x10	NEG0946
Överdrag, bomull		NEG0972
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0959
Överdrag, Combi		NEG0946HLEN

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Universalkudde Blå	35x20	NEG0945
Överdrag, bomull		NEG0971
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0958
Överdrag, Combi		NEG0945HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Universalkudde Halvmåne Blå	46x22	NEG0942
Överdrag, bomull		NEG0968
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0955
Överdrag, Combi		NEG0942HLEN



Böjda kuddar



Bågformade kuddar som avser att ge stabila vilolägen i sidliggande, ryggliggande, sittande och halvsittande positioner.



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Banankudde XL Blå	225x45x33	NEG3004
Överdrag, bomull		NEG3904
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG3804
Överdrag, Combi		NEG3004HLEN

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Banankudde Blå	120x75x30	NEG0608
Överdrag, bomull		NEG0630
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0623
Överdrag, Combi		NEG0608HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Banankudde Grön	110x55x23	NEG0882
Överdrag, bomull		NEG0905
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0895
Överdrag, Combi		NEG0882HLEN

Banankudden kan användas i flera positioner för att ge brukaren stabila vilolägen. Vg se hemsidan www.togemo.se

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Bålstöds kudde Blå	90x70x30	NEG0941
Överdrag, bomull		NEG0967
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0954
Överdrag, Combi		NEG0941HLEN



Kudden stabiliserar bålen och ger ett bra underarmsstöd i sittande och halvsittande position



CareWave	Storlek cm	Art. nr
C-kudde Lång Blå	110x75x40	NEG0939
Överdrag, bomull		NEG0965
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0952
Överdrag, Combi		NEG0939HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
C-kudde Lång Blå	105x70x35	NEG0940
Överdrag, bomull		NEG0966
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0953
Överdrag, Combi		NEG0940HLEN

De långa C-kuddarna kan användas för att skapa stabila positioner i rygg eller sidoläge. I sidoläge kan armen placeras i en stabil och neutral position. Vg se hemsidan www.togemo.se

CareWave	Storlek cm	Art. nr
C-kudde Tjock Blå	90x50x35	NEG0947
Överdrag, bomull		NEG0973
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0960
Överdrag, Combi		NEG0947HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
C-kudde Tjock Blå	70x40x25	NEG0948
Överdrag, bomull		NEG0974
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0961
Överdrag, Combi		NEG0948HLEN

CareWave	Storlek cm	Art. nr
C-kudde Tunn Blå	80x45x25	NEG3005
Överdrag, bomull		NEG3905
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG3805
Överdrag, Combi		NEG3005HLEN



Kuddarna kan användas för att skapa stabila positioner i sittande, rygg eller sidoläge. Positioneringskudden placeras från Skulderpartiet upp mot nacken för att fylla ut området vid måttlig bröstkyfos. För att bibehålla armen i en neutral position i sittande kan kudden stödja från överarmen, armbågen och ner mot handen. C- kudden kan också användas som "bord/-underarmstöd" för olika aktiviteter i sittande och halvsittande läge.

Barn kan placeras i magläge över kudden. Det ger barnet en möjlighet till att sträcka upp i nacke, bröstrygg samt underlätta stimulans av huvud och öga- hand kontroll.

I sidoliggande kan C-kudde Tjock, användas som benskiljare samt även stabilisera armen i en neutral position.

C-kudde Tunn, kan användas som Hemi-kudde, stöd och utfyllnad av bröstkyfos, samt som frontalstöd i sittande.



S-kuddar



S-kuddarna används primärt för att skapa tryckavlastande 10-30° sidoläge. Kuddens övre del placeras bakom ryggen och den nedre delen förs sedan upp mellan knän och underben. Vid positionering i 120-135° framstupa sidoläge placeras kuddens övre del framför och under överarmen, dess mellersta del framför och under det vinklade låret, dess nedersta del framför och under underbenet och foten. S-kuddarna kan även användas vid dränageläge och vid spasticitetshämmande positioner.

CareWave	Storlek cm	Art. nr
S-kudde extra stor Blå	210x40	NEG1030
Överdrag, bomull		NEG1051
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG1069
Överdrag, Combi		NEG1030 HLEN



Passar brukare
över 175 cm



Passar brukare
upptil 175 cm

CareWave	Storlek cm	Art. nr
S-kudde Blå	170x30	NEG0610
Överdrag, bomull		NEG0631
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0624
Inkontinens överdrag, polyurethan, svetsad		NEG1107
Överdrag, Combi		NEG0610 HLEN

CareWave	Storlek cm	Art. nr
S-kudde Grön	130x25	NEG0883
Överdrag, bomull		NEG0906
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0896
Överdrag, Combi		NEG0883 HLEN



Passar brukare
under 150-160 cm



Nackkuddar



Nackkuddar med och utan låsfunktion för att stabilisera och stödja huvudet.

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Nackkudde Blå	42x48	NEG0612
Överdrag, bomull		NEG0633
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0626
Överdrag, Combi		NEG0612 HLEN



Nackkudde med låsfunktion
Låsfunktionen kan gömmas i överdraget vb, eller klippas bort



Nackkudde med låsfunktion
Låsfunktionen kan gömmas i Överdraget vb, eller klippas bort.

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Nackkudde Grön	32X40	NEG0880
Överdrag, bomull		NEG0903
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0893
Överdrag, Combi		NEG0880 HLEN

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Nackkudde Blå	50x40x20	NEG0949
Överdrag, bomull		NEG0975
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0962
Överdrag, Combi		NEG0949 HLEN



Nackkudde med öppen front.
Materialet kan omfördelas i kudden.



Nackkudde med öppen front.
Materialet kan omfördelas i kudden.

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Nackkudde Blå	32x32x10	NEG0950
Överdrag, bomull		NEG0976
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0963
Överdrag, Combi		NEG0950 HLEN



Trekantskuddar



Trekantskuddarna kan användas som ryggstöds kudde i sidliggande eller som underbenskudde i halvsittande och rygliggande positioner. De minsta storlekarna kan avlasta arm i sidposition.

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Trekantskudde Blå	70x40x40	NEG2010
Överdrag, bomull		NEG2910
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG2810
Överdrag, Combi		NEG2010 HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Trekantskudde Blå	60x35x35	NEG0607
Överdrag, bomull		NEG0629
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0622
Överdrag, Combi		NEG0607 HLEN

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Trekantskudde Grön	45x28x28	NEG0887
Överdrag, bomull		NEG0909
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0899
Överdrag, Combi		NEG0887 HLEN



Kudden kan placeras under knäna för att undvika skjuvning i "hjärtläge". Kudden ger en möjlighet att bibehålla lederna i en neutral och symmetrisk position. Samlar ihop benen och avlastar knä och höftkontrakturer.



Positioneringsrullar



Positioneringsrullar kan användas för trycksårsprevention vid lägesändringar samt vid kontrakturprofilax. Den grovmotoriska utvecklingen i magläge hos barn, kan stimuleras med hjälp av positionering, här är positioneringsrullen ett bra hjälpmedel.

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Positioneringsrulle Blå	75x20	NEG0613
Överdrag, bomull		NEG0634
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0627
Överdrag, Combi		NEG0613 HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Positioneringsrulle Grön	48x17	NEG0884
Överdrag, bomull		NEG0907
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0897
Överdrag, Combi		NEG0884 HLEN

Positioneringsrulle kan användas för att avlasta eller stabilisera specifika kroppsdelar i olika positioner i säng, rullstol eller på tippbräda. Vid kontraktur i höft eller knäled kan rullen placeras under knäleden. För att stabilisera sittande, minska eventuell spasticitet och minska höftledsvinkeln kan positioneringsrullen placeras under lårens framkant i sittande/halvsittande position.

Positioneringsrullen kan också användas som stöd i nacklordosen när vanlig kudde ej kan användas. För små barn kan rullen användas som bröststöd i magläge.

I sidliggande kan rullen placeras framför bälen. Skuldra n, axeln och armen kan omfamna rullen i ett avlastande och neutralt läge. Vid smärta i axeln och efter stroke kan positioneringsrullen ge lindring och bibehålla skuldran i en bra position.

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Positioneringsrulle Blå (par)	35x20	NEG0614
Inkontinens överdrag, polyurethan (par)		NEG0691
Överdrag, Combi		NEG0614 HLEN



Rullen kan användas för att avlasta eller stabilisera specifika kroppsdelar i olika positioner i säng, rullstol eller på tippbräda. Vid kontraktur i höft eller knäled kan rullen placeras under knäleden. För att stabilisera sittande, minska eventuell spasticitet och minska höftledsvinkeln kan positioneringsrullen placeras under lårens framkant i sittande/halvsittande position. Dessa små rullar kan med fördel användas för att frigöra hälen vid omläggning eller vid tillfällig rodnad av hälbenet. Undvik att översträcka knäleden eller att utsätta brukaren för ett ökat sacralt tryck.



Kilkuddar



Kilkuddarna finns i tre storlekar, de kan användas för att abdusera benen i sittande eller i ryggliggande position. I magliggande position används kuddarna för avlastande eller aktiva positioner såsom vid dränageläge och kontrakturprofylax. Kilkuddarna kan också användas vid högläge för arm eller ben vid svullnad (ödem).

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Kilkudde extra stor Blå	95x30x45	NEG0811
Överdrag, bomull		NEG1097
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0812
Överdrag, Combi		NEG0811 HLEN



Denna kilkudde kan användas för aktivt magläge eller dränageläge på behandlingsbänk eller på golv. I ryggliggande position kan kudden avlasta och reducera svullnad (ödem) av arm eller ben..

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Kilkudde Blå	30x18x20	NEG0615
Överdrag, bomull		NEG1052
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0778
Överdrag, Combi		NEG0615 HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Kilkudde Grön	23x14x15	NEG0888
Överdrag, bomull		NEG0910
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0900
Överdrag, Combi		NEG0888 HLEN

Kuddarna används framförallt för abduktion av lårbenen i sittande position. Kan även användas för att få en neutral position i handleden och rätta ut fingerlederna. Postoperativt vid handledsfrakturer kan kilkudden ge ett högläge och reducera svullnad.



Specialkuddar

Specialkuddar med mycket specifika ändamål. Läs nedan för mer information om positionerings-kuddarna.

Kuddarnas avfasade del placeras under låret och abduktionsdelen medför att benen separeras. På ett mjukt och följsamt sätt placeras benen i en mer neutral position i halvsittande eller i ryggliggande. Kuddarna kan också fungera som bål/under-armstöd i magläge. Semi-Fowler kuddens mittenparti (abd.delen) får då hjälpa till att ge support för huvudlyft och armarna kan sträckas fram för lek och aktivitet.

XXL kan användas för stöd åt bröstkyfos i liggande samt som stöd vid sittande på sängkanten eller för WSH för brukare med stora flektionskontrakturer. SF med HÖG abd del anv förbrukare med starka höftböjare, där de i normalfallet lyfter benet över abd delen på NEG0611 eller NEG0886.



CareWave	Art.nr
Semi-fowler XXL 88x63x15 cm	NEG1391
Överdrag, bomull	NEG1396
Inkontinens överdrag, polyurethan	NEG1397
Överdrag, Combi	NEG1391HLEN



CareWave	Art.nr
Semi-fowler 70x50x12 cm	NEG0611
Överdrag, bomull	NEG0632
Inkontinens överdrag, polyurethan	NEG0625
Överdrag, Combi	NEG0611HLEN



CareWave	Art.nr
Semi-fowler 55x40x10 cm	NEG0886
Överdrag, bomull	NEG0908
Inkontinens överdrag, polyurethan	NEG0898
Överdrag, Combi	NEG0886HLEN



CareWave	Art.nr
Semi-fowler XXS 41x30x8 cm	NEG1743
Överdrag, bomull	NEG1745
Inkontinens överdrag, polyurethan	NEG1744
Överdrag, Combi	NEG1743HLEN



Semi-fowler med hög ABD passar bra för brukare med starka höftböjare som vill korsar benen i liggande position. Combiöverdrag finns att beställa som tillbehör.

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Semi Fowler Hög ABD Blå	70x50x25	NEG2021
Överdra, bomull		NEG2921
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG2821
Överdrag, Combi		NEG2021HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Semi Fowler Hög ABD Grön	55x40x18	NEG2022
Överdrag, bomull		NEG2922
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG2822
Överdrag, Combi		NEG2022HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
T-kudde Large Blå	65(42)x25x25	NEG3006
Överdrag, bomull		NEG3906
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG3806
Överdrag, Combi		NEG3006HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
T-kudde Medium Grön	49(36)x18x20	NEG3007
Överdrag, bomull		NEG3907
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG3807
Överdrag, Combi		NEG3007HLEN



T-kuddens avfasade del placeras under låret och abduktionsdelen medför att benen separeras. På ett mjukt och följsamt sätt placeras benen i en mer neutral position i sittande eller i ryggliggande position. Kudden kan även placeras på fotplattan till sulky/rullstol och avlasta samt positionera felställningar i fötter.



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Hemi-armstödskudde Blå	60x35x26	NEG0732
Överdrag, bomull		NEG1053
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0755
Överdrag, Combi		NEG0732 HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Hemi-armstödskudde Grön	50x30x24	NEG0889
Överdrag, bomull		NEG0912
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0901
Överdrag, Combi		NEG0889 HLEN



Kudde för att stabilisera paretisk arm sittande i rullstol eller fåtölj. Kudden kan användas utan bord eller armstödsplatta. Den består av två delar. Den undre delen placeras i knät och den övre delen vinklas och fästs med hjälp av kardborreband mot den undre kudden. Hemi-armstödskudden kan avlasta den smärtande och paretiska armen. Kudden kan även användas som frontaltöd, för brukare med astma-kol-emfysem etc.

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Stabiliseringskudde ben Blå	80x70	NEG1075



Denna specialkudde ger en mjuk och följsam men ändå stabil positionering av benen i neutralläge. Hämlarna avlastas då kudden har en liten förhöjning i dess nedre del.

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Fjärilskudde Blå	40x30x10	NEG0919
Överdrag, bomull		NEG0923
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0921
Överdrag, Combi		NEG0919 HLEN



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Fjärilskudde Grön	30x20x8	NEG0890
Överdrag, bomull		NEG0911
Inkontinens överdrag, polyurethan		NEG0902
Överdrag, Combi		NEG0890 HLEN



Kuddens form gör att den kan stödja och stabilisera underarmen, knäleden eller fotleden. Fjärilskudden är också en unik kudde som kan hjälpa vårdgivaren att "lyfta" benet vid sårömläggning och bandagering samt stabilisera underarmen vid venprovtagning i säng. Vid ADL- på-av klädning , (N.ex), kan kudden hjälpa brukaren att få upp foten fr underlaget. För barn med hydrocephalus kan kudden stödja i nacklordosen.



Tryckavlastningskuddar



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Avlastningskudde Öra Blå	30x30	NEG1103
Överdrag, bomull		NEG1381
Överdrag, Combi		NEG1103 HLEN



Kudden är fylld med bolsterpärlor som formar sig efter ansiktets form och stödjer från hak-spetsen över kind och käkpartiet upp mot tinningloben. Ett elastiskt hål format som ett öra i kombination med kuddens fyllnadsmaterial gör att örat får en total avlastning. Kudden används framförallt av brukare som ligger stilla i sängen och som riskerar att få trycksår eller som redan har sår. Kudden placeras på en underliggande huvudkudde. Palpera och känn efter så att örat ligger fritt och avlastat.

CareWave	Storlek cm	Art. nr
Hälskydd Blå	32x25	NEG0616



CareWave	Storlek cm	Art. nr
Hälskydd Grön	25x20	NEG0885

Hälskydd som ger avlastning för hälen, skyddar malleolerna samt bibehåller fotleden i ett neutralt läge i liggande position. Hälskyddet kan också användas när brukaren sitter i komfortstol under dagtid. Fixeras med hjälp av kardborreband.

FitLeg	Storlek cm	Art.nr
FitLeg Non-slip (2 delar)	58x55x12 50x21x10,5	NEG777161
Överdrag, bomull		NEG1387
Överdrag, PU		781551TOG



2-delad anatomisk formad underbenskudde som förhindrar att brukaren glider nedåt i sängen. Kudden reducerar risken att brukaren utsätts för friktion och skjuvkrafter. Benen hålls i en symmetrisk och neutral position och motverkar att knäleden översträcks. Hämlarna avlastas. Kudden kan även användas i en standard säng, inom palliativ vård, tillsammans med ett elektriskt/manuellt ryggstöd. Kan även användas postoperativt eller under rehabilitering. Skumbas; HR-kallskum, Överdrag; Polyuretanbeklädd polyesterväv





CareWave	Storlek cm	Art. nr
Hälskydd fotända Blå	90x20	NEG0609
Överdrag Combi		NEG0609HLEN




Fotavlastningskudde kan användas vid sänggavel eller monteras runt madrassen med hjälp av fixlås. Vid kontraktur eller översträckning i knäleden, sänk sängens bendel eller placera en Universalkudde (NEG0944) under benet. När kudden används för att motverka droppfot eller andra felställningar, rekommenderas det att Inspektera foten dagligen för att se om ytterligare avlastande kuddar behövs. För att skydda foten och minska risken för tryck kan en Universalkudde placeras mellan fotavlastningskudden och sänggaveln.

FitLeg	Storlek cm	Art. nr
FitLeg lång	58x55x12	NEG774429
FitLeg kort	55x40x12	NEG777398
Överdrag, bomull (lång)		NEG1386
Överdrag bomull (kort)		NEG1628
Överdrag, PU (lång)		781549TOG
Överdrag, PU (kort)		781550TOG



FitLeg, anatomisk formad underbenskudde med hälavlastning i 2 storlekar. Kudden har en anatomisk form som innebär att den avfasade delen följer låren och underbenen samt motverkar översträckning av knäleden. Detta motverkar risken för ett ökat tryck mot hud och muskulatur. Kudden har även formats för att benen skall placeras in i en så symmetrisk position som möjligt. Hälen får en total avlastning. Kudden rekommenderas för brukare som behöver få hjälp att samla ihop benen. Kan vara brukare med neurologiska funktionshinder där benen utan positionering hamnar i ett utåt-roterat/ abducerat läge.

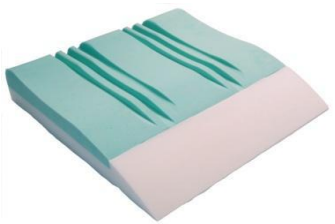

Kudden kan användas inom palliativ vård, samt av brukare som har tunga svullna ben eller för brukare som har eller riskerar att få trycksår. Skumbasen består av HR-kallsaum samt ett viskoelastisk lager. Kallsaumet gör att den blir formstabil. Det viskoelastiska toppen låter brukarens ben sjunka ner i underbenskudden och avlastar och stödjer benen utifrån dess anatomiska form. Överdraget består av svart polyuretanbeklädd polyesterväv.

FitLeg	Storlek cm	Art. nr
FitLeg EVO	58x55x12	NEG774430
Överdrag, bomull		NEG1385
Överdrag, PU		841020TOG



FitLeg EVO XL lång, anatomisk formad underbenskudde med hälavlastning. Kudden har en anatomisk form som innebär att den avfasade delen följer låren och underbenen samt motverkar översträckning av knäleden. Detta motverkar risken för ett ökat tryck mot hud och muskulatur. Kudden har även formats för att benen skall placeras in i en så symmetrisk position som möjligt. Kudden har en abduktionsdel som skall förhindra att benen korsas eller adduceras. Hälen får en total avlastning. Kudden rekommenderas för brukare som behöver få hjälp att separera benen. Kan vara brukare med neurologiska funktionshinder där benen utan positionering hamnar i ett inåt-roterat/ adducerat läge. Kudden kan användas inom palliativ vård, samt av brukare som har tunga svullna ben eller för brukare som har eller riskerar att få trycksår.



Skumbasen består av HR-kallsaum samt ett viskoelastisk lager. Kallsaumet gör att den blir formstabil. Det viskoelastiska toppen låter brukarens ben sjunka ner i underbenskudden och avlastar och stödjer benen utifrån dess anatomiska form. Överdraget består av polyuretanbeklädd polyesterväv.



Utprovnings-Kit



En samling av olika typer av positioneringskuddar som kan användas vid utprovning. Väska medföljer.

CareWave	Art. nr
Utprovnings-Kit för vuxna Väska med kuddar för utprovning	UKITV
Överdrag, bomull, till alla kuddar	UKITV-BOM
Inkontinens överdrag, polyurethan, till alla kuddar	UKITV-INK
Överdrag, Combi, till alla kuddar	UKITV-HLEN

CareWave	Art. nr
Utprovnings-Kit för barn Väska med kuddar för utprovning	UKITB
Överdrag, bomull, till alla kuddar	UKITB-BOM
Inkontinens överdrag, polyurethan, till alla kuddar	UKITB-INK
Överdrag, Combi, till alla kuddar	UKITB-HLEN



Utprovnings-Kit för vuxna - innehåll

CareWave	Art. nr
Specialbag	NEG1056
Universalkudde Blå 70x40 cm	NEG0944
Universalpute Blå 2-pack 40x30 cm	NEG0606
Trekantskudde Blå 60x35x35 cm	NEG0607
Banankudde Blå 120x75x30 cm	NEG0608
S-kudde Blå 170x30 cm	NEG0610
Semi-fowler kudde Blå 70x50x12 cm	NEG0611
C-kudde lång Blå 105x70x35 cm	NEG0940
C-kudde tjock Blå 90x50x35cm	NEG0947
Nackkudde Blå 50x40x20 cm	NEG0949



Utprovnings-Kit för barn - innehåll

CareWave	Art. nr
Specialbag	NEG1082
Universalkudde Blå 70x40 cm	NEG0944
Universalkudde Blå 60x40 cm	NEG0605
Universalkudde Grön 45x30 cm	NEG0881
Banankudde Grön 110x55x23 cm	NEG0882
C-kudde tjock Blå 70x40x25 cm	NEG0948
S-kudde Grön 130x25 cm	NEG0883
Semi-fowler kudde Grön 55x40x10 cm	NEG0886
Trekantskudde Grön 45x28x28 cm	NEG0887
Nackkudde Blå 32x32x10 cm	NEG0950



Förvaringsväskor



Väskor för förvaring av positioneringskuddar.

CareWave	Art. nr
Förvaringsväska Blå standard	NEG0617
Förvaringsväska Blå extra stor	NEG1056

CareWave	Art. nr
Förvaringsväska Grön standard	NEG0891
Förvaringsväska Grön extra stor	NEG1082



CareWave®



TOGEMO

Manufactured by
Pharmaouest
PREVENTIX

COMBI-ÖVERDRAG TILL CAREWAVE-KUDDAR



COMBI-överdragen består av en stickad jersey med en tunn polyuretanfilm på insidan. Överdragets yta består av Tencel / Lyocellfibrer som är mjuka och behagliga och som ej ruggar upp huden.

Överdraget kan användas som ett komfortöverdrag, istället för Bomullsstreichfrotte överdraget. COMBI-överdraget upplevs ej lika varmt och tätt som vanliga hygienöverdrag. Rekommenderas även för barn och brukare med känslig hud.

Tensel / Lyocell är framtaget i en miljövänlig process, där mindre mängd vatten och kemikalier har använts.

Materialet kommer från naturliga fibrer från ffa träd.

Tyget är stretchbart och ångandas, dvs det släpper ej in allergener, bakterier eller vätska, men andas.

Övedraget kan appliceras på kudde vid dusch. Ta av överdraget direkt efteråt och låt kudde o överdraget ligga luftigt, för att torka i ett torrt utrymme.

Överdraget är testat enligt Oeko-tex standard 100, klass 1.

Uppfyller följande brandklasser; BS7175 upp till CRIB 7, EN597,1-2 ISO12952,1-4.

TVÄTTRÅD; Tvätta i 40-60 –(95)grader, dropptorka eller torktumla på låg värme. Tvätt i högre temperatur påverkas överdragets livslängd. Ej sköljmedel.



Tillverkare Pharmaouest Industries
Z.A. Actipole
FR-35540 – Miniac-Morvan – France



Rengöring / Fakta

FitLeg underbenskuddar kan inte tvättas i tvätt-maskin. Torka av dem med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel samt desinficera. Överdragen kan tvättas i 60°-95° , och dropptorka eller torktumlas i låg- - normal värme.

Övriga positioneringskuddar rekommenderar vi att ni i första hand torkar av och desinficeras. Garantin gäller ej om kudden maskintvättats. (Om kudden maskintvättas, kan torktiden bli väldigt lång. Skydda kudden med en täckande tvättpåse så att tvättmaskinens vassa delar ej skadar kuddens ytskikt.)

De avtagbara överdragen i Combi, Bomullsstretchfrotté eller Inko-PU, kan tvättas i tvättmaskin i respektive 60° till -95° och dropptorka eller torka i torkskåp /torktumlare på låg-normal värme. Undvik att torktumla i höga temperaturer. Väljer ni låg värme tom 40-60 ° förlängs hållbarheten- - livslängden.

Vänd ut och in på Inkontinensöverdraget för att skydda dess polyuretanskikt. Förslut dragkedjan innan tvätt.

DESINFEKTION:

Ytdesinfektionsmedel med tensider . Vb kan Virkon eller Perasafe användas. Följ föreskrifterna och skölj av det oxiderande medel.

SKÖLJMEDEL:

Positioneringskuddar, hälskydd och polyuretanöverdrag tål inte sköljmedel.

SÄKERHET:

Förvara/placera kuddarna så att de inte utsätts för vassa föremål.

FÖRVARING/Transport; Produkterna tål temperaturskiftning ml -30- +35°.

STANDARDS:

Produkterna är CE-märkta. Produkterna är testade och godkända enligt EN-597-1-2 , NF-EN ISO 12952-1-4.

ISO 04 48 27; Positioneringskuddar för behandling och träning.

ISO 09 07 06; Positioneringskuddar/positioneringssystem

ISO 09 06 21; Hälavlastning

MDD 93/42 EEC samt MDR/2017/745

FYLLNADSMATERIAL:

POSITIONERINGSKUDDAR-HÄLSKYDD: Bolsterpärlor av polystyren och eller silikoniserat hålfiber

UNDERBENSKUDDAR : Kallskum och eller viskoelastisk skum.

ÖVERDRAG: Inkontinensöverdrag av elastisk polyurethan. Bomullsöverdrag i elastisk bomullsfrotté. COMBI-överdrag i mjuk Tencel/ Lyocell jersey och tunn PU film invändigt. **ALLA ÖVERDRAG ÄR STRETCHBARA.**

MILJÖ: Produkterna innehåller inte Latex, ftalater eller bromerande flamskyddsmedel. Vi följer REACH förordningen.





Togemo AB

Postadress

Östra Vagnatan 8
702 27 Örebro

Rådgivning

Ingela Nyström 0722-19 59 69 / ingela@togemo.se
Annika Salminen 0722-19 59 60 / annika@togemo.se

Kundservice 019-25 40 40
Ordermejl post@togemo.se

www.togemo.se

