

CARE CONCEPT
POZ' IN' FORM
PHARMAQUEST INDUSTRIES

POSITIONERING

Produktlista för positioneringskuddar
2021.3



CE Tillverkare Pharmaouest Industries
Z.A. Actipole
FR-35540 Miniac-Morvan – France



Tlf kundservice: 019-25 40 40 Tlf produktfrågor och rådgivning: 0722 19 59 69, E-post: post@togemo.se

Grundläggande principer

Målsättningen för en förändring i brukarens "positioneringsvardag" skall vara att:

- Optimera funktion
- Reducera och/eller förebygga risk för sekundärskador
- Förbättra arbetsituationen för omsorgspersonal

Principerna för positionering:

- Rörelse är grundläggande
- Rörelse, så väl aktivt som passivt ska vara i balans och i symmetri
- Postural stabilitet utgör basen för funktionell aktivitet
- Kroppshållning påverkar de flesta kroppsliga funktioner
- Kroppshållning påverkar neurologiska symptom såsom reflexer och tonus
- Tyngdkraftens påverkan kan orsaka vävnadskada/deformiteter, men kan förebyggas vid adekvat positionering
- Ingen led skall vara i ytterläge under en längre tid
- Fysiskt och mentalt tillstånd påverkar varandra
- Stimulans genom aktivitet, både mentalt och fysisk, är viktig
- 24-tim schema underlättar och ger bäst möjlighet att genomföra positionering utifrån dessa principer
- Fotografera för att illustrera utvalda positioner.
- Märk upp positioneringsprodukterna

Nedsatt postural funktion och nedsatt förmåga till egna rörelser kan leda till:

- Muskelförkortning/förlängning som leder till kontrakturer och deformiteter
- Vävnadsskador inklusive trycksår
- Nedsatt syrenivå på grund av negativ påverkan av respirationen
- Infektioner i luft och urinvägar
- Osteoporos (Benskörhet)
- Matsmältningsbesvär/ förstoppning.
- Smärta och sekundärt nedsatt rörelseförmåga

Pauline M Pope skriver i kapitel 6, sid 105 i sin bok *Severe and Complex Neurological Disability*; "De flesta sjuka brukare tillbringar många timmar till sängs och kan utsättas för olika skador. Det är högst troligt att de flesta assymmetrier uppstår i liggande position och sedan permanentas i sittande".

Dessa så kallade "vaneställningar" påverkar vardagen för brukaren. För att försöka motverka att felställningar och kontrakturer uppstår kan varierande och förebyggande lägesändringar och positioner under dygnets 24 timmar schemaläggas.

Funktion och självständighet skall vägas mot en "korrekt positionering". När brukaren hamnar i en "vaneställning" under långa perioder under dagen, kan vi kompensera med hjälp av lägesändring och positionering.

Förslag på positioner under 24-timmars positionering.

- Magläge (över kil eller rulle)
- Stå/upprätt position (tipp eller ståstöd)
- Sideläge (30 ° och 120 ° på gymnastikmatta eller i säng)
- Sittande med frontalstöd (underarmsstöd)

Brukaren, omvårdnadspersonalen och anhöriga bör få återkommande support och uppdatering av handhavandet kring brukaren av leg.sjukgymnast/arbetsterapeut/sjuksköterska. En gemensam strategi skall antas utifrån nedanstående parametrar. Viktigt att handhavandet (management regime) följs av alla som i vardagen har kontakt med brukaren.

- Definition av problemställning
- Konsekvensutredning
- Motivering
- Planering
- Genomförande
- Utvärdering



Innehåll

Poz' In' Form	Sida
Rengöring / Fakta	3
Universalkuddar / A-V-T kudde	4
Trekantskuddar	5
Positioneringsrulle	6
Nackkuddar	7
Böjda kuddar C-kudde Halv C-kudde Tjock	8
Böjda kuddar Banankuddar	9
S-kuddar	10
Abd/adduktionskuddar	11
Symetric Abd-add kudde	12
Kilkuddar	13
Avlastningskudde huvud	14
Hälavlastning fotända	15

Rengöring / Fakta

Rengöring:

1a hand spritavtorka
2a hand torka av kudden.
3e hand maskintvätt



Tål ytdesinfektion, gäller endast kudde med PU hygienskydd.
Combi och PU-överdragen skyddar kudden, och reducerar antalet tvättcykler.

Combi komfort-överdrag, mjukt och stretchbart med en tunn PU film invändigt.
Kan tvättas vid behov upp till 95°C. Tvättas mellan varje patient/brukare i 60°C
Combi komfort-överdraget kan torktumlas på låg värme eller droptorkas.
Ej sköljmedel.



PU-Hygienöverdrag elastisk i 2 led

Torka av överdraget vid behov med mildt diskmedel eller ytdesinfektionsmedel med tensider.
Blod, urin och avföring löses lättast upp med kallt vatten.
Mellan varje patient bör hygienöverdraget tvättas i maskin 60°C.
Hygienöverdraget kan torktumlas på låg värme eller droptorkas.
Ej Sköljmedel.



Öko-tex 100 klass 1
certifierade överdrag.

Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001. Produkterna är CE märkta.
Produkterna uppfyller Medicinteknisk direktivet MDD93/42/EE o MDR/2017/745 from Maj 2021.
Brand; NF EN 597-1-2
Brand; NF ISO 12952-1-2 2010.
Brand ;CRIB 5 och 7.



Universalkuddar / A-V-T kudde

POZ in FORM Universalkudde kan användas i sittande, halvsittande eller i liggande position. Kudden avlastar, och skyddar brukaren i en optimal position. Kuddarna finns i fem storlekar och kan utifrån brukarens behov användas i rullstol, säng eller där behov föreligger. *A-V-T kudden*, används främst för andningsbefrämjande positioner.

Kudden finns med Avtorkningsbart Hygienöverdrag eller Mjukt och Hudvänligt Stretchbart COMBI överdrag. Båda överdragen har en skyddande yta som medför att Kudden ej behöver tvättas så ofta.

Art.nr	Universalkudde 35x25 cm
POZ22.901	Universalkudde Grå 25x35 cm inkl PU överdrag
POZ22.901LEN	Universalkudde Grå 25x35 cm inkl Combi överdrag
POZ22.901H	PU överdrag
POZ22.901HLEN	Combi överdrag



Art.nr	Universalkudde 55x40 cm
POZ22.902	Universalkudde Grå 55x40 cm inkl PU överdrag
POZ22.902LEN	Universalkudde Grå 55x40 cm inkl Combi överdrag
POZ22.902H	PU överdrag
POZ22.902HLEN	Combi överdrag

Art.nr	Universalkudde 40x15 cm
POZ22.903	Universalkudde Grå 40x15 cm inkl PU överdrag
POZ22.903LEN	Universalkudde Grå 40x15 cm inkl Combi överdrag
POZ22.903H	PU överdrag
POZ22.903HLEN	Combi överdrag



Art.nr	Universalkudde 70x50 cm
POZ22.904	Universalkudde Grå 70x50 cm inkl PU överdrag
POZ22.904LEN	Universalkudde Grå 70x50 cm inkl Combi överdrag
POZ22.904H	PU överdrag
POZ22.904HLEN	Combi överdrag

Art.nr	Universalkudde A-V-T 85x25 cm
POZ22.971	Universalkudde Grå 85x25 cm inkl PU överdrag
POZ22.971LEN	Universalkudde Grå 85x25 cm inkl Combi överdrag
POZ22.971H	PU överdrag
POZ22.971HLEN	Combi överdrag



Trekantskuddar

POZ in FORM Trekantskudde kan användas som ryggstöds kudde i sidliggande och eller som underbenskudde i halvsittande eller i ryggliggande positioner. Kudden ger möjlighet till att samla ihop benen. Äldre brukare som glider ner mot fotgaveln eller som har höft/knäkontrakturer kan också vara hjälpt av denna kudden.

Kudden finns med Avtorkningsbart Hygienöverdrag eller Mjukt och Hudvänligt Stretchbart COMBI överdrag. Båda överdragen har en skyddande yta som medför att Kudden ej behöver tvättas så ofta.



Art.nr	Trekantskudde 70x40x40 cm
POZ22.905	Trekantskudde Grå 70x40x40cm inkl PU överdrag
POZ22.905LEN	Trekantskudde Grå 70x40x40 cm inkl Combi överdrag
POZ22.905H	PU överdrag
POZ22.905HLEN	Combi överdrag

Art.nr	Trekantskudde 56x32x25 cm
POZ22.910	Trekantskudde Grå 56x32x25 cm inkl PU överdrag
POZ22.910LEN	Trekantskudde Grå 56x32x25 cm inkl Combi överdrag
POZ22.910H	PU överdrag
POZ22.910HLEN	Combi överdrag



Positioneringsrulle

POZ in FORM Positioneringsrulle finns i en storlek, och kan användas i sittande, halvsittande eller i liggande position. Rullen kan användas för att avlasta häloområdet eller för att avlasta kontraktur i höft/knäled. För barn kan kudden placeras under bålen / armhålorna i maglägesposition, för att stimulera underarmstöd och en aktiv huvudkontroll.

Kudden finns med Avtorkningsbart Hygienöverdrag eller Mjukt och Hudvänligt Stretchbart COMBI överdrag. Båda överdragen har en skyddande yta som medför att Kudden ej behöver tvättas så ofta.



Art.nr	Positioneringsrulle 75x18 cm
POZ22.940	Positioneringsrulle Grå 75x18 cm inkl PU överdrag
POZ22.940LEN	Positioneringsrulle Grå 75x18 cm inkl Combi överdrag
POZ22.940H	PU överdrag
POZ22.940HLEN	Combi överdrag



Nackkuddar

POZ in FORM Nackkudde, finns med öppen front eller med låsfunktion, och är avsedda för att stabilisera huvudet i olika positioner. Även C-kudde Halv kan användas som Nackkudde.



Nackkudde med låsfunktion skall endast användas när brukaren är under uppsikt. Vid behov kan låsanordningen klippas bort.

Nackkudde POZ med öppen front och C-kudde Halv kan användas som en böjd kudde för barn.

Kudden finns med Avtorkningsbart Hygienöverdrag eller Mjukt och Hudvänligt Stretchbart COMBI överdrag. Båda överdragen har en skyddande yta som medför att Kudden ej behöver tvättas så ofta.

Kuddens mjukt omslutande förmåga och dess tyngd ger en lugn och prasselfri positionering.

Lämpar sig väl för palliativ vård, barn-ungdom , äldreomsorg eller för oroliga brukare.

Art.nr	Nackkudde 135x22 cm
POZ22.965	Nackkudde Grå 135x22 cm inkl PU överdrag
POZ22.965LEN	Nackkudde Grå 135x22 cm inkl Combi överdrag
POZ22.965H	PU överdrag
POZ22.965HLEN	Combi överdrag



Art.nr	Nackkudde 50x40x20 cm
POZ22.1903	Nackkudde Grå 50x40x20 cm inkl PU överdrag
POZ22.1903LEN	Nackkudde Grå 50x40x20 cm inkl Combi överdrag
POZ22.1903H	PU överdrag
POZ22.1903HLEN	Combi överdrag



Böjda kuddar

POZ in FORM C-kudde halv, kan användas som stöd för huvudet i sittande eller i liggande position. Halvsittande i säng eller i rullstol kan kudden användas som underarmstöd. Vid sidoposition kan kudden avlasta öra, hand eller arm. *C-kudde tjock*, kan användas som omslutande kudde/ underarmstöd eller som bendelare i sidoposition. Stöd under lår o knä.

Kudden finns med Avtorkningsbart Hygienöverdrag eller Mjukt och Hudvänligt Stretchbart COMBI överdrag. Båda överdragen har en skyddande yta som medför att Kudden ej behöver tvättas så ofta.

Kuddens mjukt omslutande förmåga och dess tyngd ger en lugn och prasselfri positionering.

Lämpar sig väl för palliativ vård, barn-ungdom , äldreomsorg eller för oroliga brukare.



Art.nr	C-kudde halv /Nackkudde 105x22 cm
POZ22.960	C-kudde halv Grå 105x22 cm inkl PU överdrag
POZ22.960LEN	C-kudde halv Grå 105x22 cm inkl Combi överdrag
POZ22.960H	PU överdrag
POZ22.960HLEN	Combi överdrag



Art.nr	C-kudde tjock 90x50x35 cm
POZ22.1902	C-kudde Grå 90x50x35 cm inkl PU överdrag
POZ22.1902LEN	C-kudde Grå 90x50x35 cm inkl Combi överdrag
POZ22.1902H	PU överdrag
POZ22.1902HLEN	Combi överdrag



Böjda kuddar

POZ in FORM Banankudde , kan användas för att ge stabila vilolägen och avlastande positioner i sittande, halvsittande eller liggande ställningar. Kudden finns i en storlek, och lämpar sig utmärkt vid positionering i sidliggande, som bendelare och som underarmstöd i sittande.

Kudden finns med Avtorkningsbart Hygienöverdrag eller Mjukt och Hudvänligt Stretchbart COMBI överdrag. Båda överdragen har en skyddande yta som medför att Kudden ej behöver tvättas så ofta.



Kuddens mjukt omslutande förmåga och dess tyngd ger en lugn och prasselfri positionering. Lämpar sig väl för palliativ vård, barn-ungdom , äldreomsorg eller för oroliga brukare.

Art.nr	Banankudde 200x30 cm
POZ22.920	Banankudde Grå 200x30 cm inkl PU överdrag
POZ22.920LEN	Banankudde Grå 200x30 cm inkl Combi överdrag
POZ22.920H	PU överdrag
POZ22.920HLEN	Combi överdrag

Art.nr	Banankudde 140x20 cm
POZ22.921	Banankudde Grå 140x20 cm inkl PU överdrag
POZ22.921LEN	Banankudde Grå 140x20 cm inkl Combi överdrag
POZ22.921H	PU överdrag
POZ22.921HLEN	Combi överdrag



S-kuddar

POZ in FORM S-kudde, kan användas primärt för att skapa trycksavlastande 220-30° sidoläge. Kuddens övre del placeras bakom brukarens nacke-rygg för att ge stabilitet. Kuddens nedre del används för bendelare. Vid positionering i framåtroterad sidoposition kan kuddens övre del istället placeras framför brukarens bål och dess nedre del användas som bendelare.

Kudden finns med Avtorkningsbart Hygienöverdrag eller Mjukt och Hudvänligt Stretchbart COMBI överdrag. Båda överdragen har en skyddande yta som medför att Kudden ej behöver tvättas så ofta.



Kuddens mjukt omslutande förmåga och dess tyngd ger en lugn och prasselfri positionering. Lämper sig väl för palliativ vård, barn-ungdom, äldreomsorg eller för oroliga brukare.

Art.nr	S-kudde 185x35 cm
POZ22.930	S-kudde Grå 185x35 cm inkl PU överdrag
POZ22.930LEN	S-kudde Grå 185x35 cm inkl Combi överdrag
POZ22.930H	PU överdrag
POZ22.930HLEN	Combi överdrag

Art.nr	S-kudde 145x25 cm
POZ22.931	S-kudde Grå 145x25 cm inkl PU överdrag
POZ22.931LEN	S-kudde Grå 145x25 cm inkl Combi överdrag
POZ22.931H	PU överdrag
POZ22.931HLEN	Combi överdrag



Abduktionskuddar

POZ in FORM T-kuddar och Abduktionskudde kan användas i liggande position för brukare som har moderat kontraktur och som ej har spasticitet. Kudden används för att separera benen på ett mjukt behagligt sätt. Behövs mer stöd, kan ni använda CareWave Semi-Fowler eller T-kudde, som har en annan fyllning.

Kuddarna finns med Avtorkningsbart Hygienöverdrag eller Mjukt och Hudvänligt Stretchbart COMBI överdrag. Båda överdragen har en skyddande yta som medför att Kudden ej behöver tvättas så ofta.



Art.nr	T-kudde 56x30x30 cm	Art.nr	T-kudde 50x20x20 cm
POZ22.995	T-kudde Grå 56x30x30 cm inkl PU överdrag	POZ22.994	T-kudde Grå 50x20x20 cm inkl PU överdrag
POZ22.995 LEN	T-kudde Grå 56x30x30 cm inkl Combi överdrag	POZ22.994 LEN	T-kudde Grå 50x20x20 cm inkl Combi överdrag
POZ22.995 H	PU överdrag	POZ22.994 H	PU överdrag
POZ22.995 HLEN	Combi överdrag	POZ22.994 HLEN	Combi överdrag



Art.nr	Abduktionskudde 35x30x15 cm
POZ22.950	Abduktionskudde Grå 35x30x15 cm inkl PU överdrag
POZ22.950 LEN	Abduktionskudde Grå 35x30x15 cm inkl Combi överdrag
POZ22.950 H	PU överdrag
POZ22.950 HLEN	Combi överdrag



Symetric Abd-add kudde

POZ in FORM Underbenskudde Symetric, som kan användas för brukare i liggande position, och halvsittande position. Tygflerpen kan användas för att omsluta benen i en vilsam position. Finns i två storlekar. Inspektera om hämlarna avlastas i denna positionen.

Kudden finns med Avtorkningsbart Hygienövedrag eller Mjukt och Hudvänligt Stretchbart COMBI överdrag. Båda överdragen har en skyddande yta som medför att Kudden ej behöver tvättas så ofta.



Art.nr	Symetric 50x40x15 cm	Art.nr	Symetric 58x55x24 cm
POZ22.997	Symetric Underbenskudde Grå 50x40x15 cm inkl PU överdrag	POZ22.996	Symetric Underbenskudde Grå 58x55x24 cm inkl PU överdrag
POZ22.997 LEN	Symetric Underbenskudde Grå 50x40x15 cm inkl Combi överdrag	POZ22.996 LEN	Symetric Underbenskudde Grå 58x55x24 cm inkl Combi överdrag



Kilkuddar

POZ in FORM Hand-Underarmskudde, är en kilkudde, som kan användas för att avlasta smärtande hand och komfortabelt stöd för hand arm. Avlastar svullen hand då kudden ger högläge.

Flera användningsområden finns för denna kilkudde.

POZ in FORM Underbenskudde, är en kilkudde, som kan användas för brukare i liggande position, och halvsittande position. Kudden används för högläge samt för att avlasta underben och häl. Kudden kan även placeras utmed bålen och ge sidostöd. Eller som stöd för paretisk arm/hand.

Kudden finns med Avtorkningsbart Hygienöverdrag eller Mjukt och Hudvänligt Stretchbart COMBI överdrag. Båda överdragen har en skyddande yta som medför att Kudden ej behöver tvättas så ofta.

Art.nr	Hand-underarmskudde 45x23x8,5 cm
POZ22.980	Hand-underarmskudde Grå 45x23x8,5 cm inkl PU överdrag
POZ22.980LEN	Hand-underarmskudde Grå 45x23x8,5 cm inkl Combi överdrag
POZ22.980H	PU överdrag
POZ22.980HLEN	Combi överdrag



Art.nr	Underbenskudde hälavlastning 48x30x12 cm
POZ22.985	Underbenskudde hälavlastning Grå 48x30x12 cm inkl PU överdrag
POZ22.985LEN	Underbenskudde hälavlastning Grå 48x30x12 cm inkl Combi överdrag
POZ22.985H	PU överdrag
POZ22.985HLEN	Combi överdrag



Avlastningskudde huvud

POZ in FORM Avlastningskudde Huvud, med ett urtag för occiput är avsedd för att stabilisera och avlasta huvudet i ffa ryggposition. Kan också användas i sidoposition för att avlasta örat. Behövs mer specifik avlastning för öra kan kudden kombineras med CareWave Öronkudde.

Kudden finns med Avtorkningsbart Hygienöverdrag eller Mjukt och Hudvänligt Stretchbart COMBI överdrag. Båda överdragen har en skyddande yta som medför att Kudden ej behöver tvättas så ofta.



Art.nr	Avlastningskudde huvud 50x40x9 cm
POZ22.990	Avlastningskudde huvud Grå 50x40x9 cm inkl PU överdrag
POZ22.990LEN	Avlastningskudde huvud Grå 50x40x9 cm inkl Combi överdrag
POZ22.990H	PU överdrag
POZ22.990HLEN	Combi överdrag



Hälavlastning fotända

POZ in FORM Hälavlastning Fotända, är avsedd för att användas för att avlasta hälar i ryggposition. Kudden levereras med ett band med fixlås. Kudden kan med hjälp av band och lås monteras runt madrassen. Lakan kan bäddas och hängas löst över Hälavlastningskudden. Viktigt att reglera sängens bendel så att ej översträckning uppstår i knäleden.

När redan uppkomna kontrakturer finns eller när sängen ej kan regleras, kan ytterligare en kudde placeras under knäleden, för att stabilisera och avlasta kontrakturen.

Kudden finns med Avtorkningsbart Hygienöverdrag eller Mjukt och Hudvänligt Stretchbart COMBI överdrag. Båda överdragen har en skyddande yta som medför att Kudden ej behöver tvättas så ofta.



Art.nr	Hälavlastning fotända 85x23 cm
POZ22.970	Hälavlastning fotända Grå 85x23 cm inkl PU överdrag
POZ22.970LEN	Hälavlastning fotända Grå 85x23 cm inkl Combi överdrag
POZ22.970H	PU överdrag
POZ22.970HLEN	Combi överdrag



Togemo AB

Postadress

ÖstraVagngatan 8
702 27 Örebro

Rådgivning

Ingela Nyström 0722-19 59 69 / ingela@togemo.se
Annika Salminen 0722-19 59 60 / annika@togemo.se

Kundservice 019-25 40 40
Ordermejl post@togemo.se

www.togemo.se

